

수동 방식과 차별화된 욕창예방 전동방식만의 POINT

의료기기 2등급 인증 획득

기존 수동식 욕창방식대비
압력 분산 효과 탁월

사용자의 압력데이터를 수집, 분석하여
욕창 예방과 치료방법에 반영

고령자 사용성 평가로 1.5kg 경량 설계

TPU소재 3분할 공기방식으로
압력 순차 분산

사용후기



지휘자 정상일 스토리



애나운서 최국화 스토리



모델 최동규 스토리



이 제품은 '의료기기'이며, 의료기기 제조 및 품질관리기준을
통과하였습니다. 올바른 사용을 위하여 사용하기 전에
반드시 '주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.



(주)네오에이블

[본사] 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화공단로 130-2, 202호
[기업부설연구소] 서울시 구로구 디지털로 242, 315호 (한화비즈메트로)
Tel. 070-4419-0152
Fax. 033-766-0423
E-mail. sales@neoable.co.kr

오래 앉아있어도
걱정없이 편안하게

욕창예방 전동방식



neoable

욕창예방 전동방석 제어부




기본모드 : 공기량 선택 가능

자동모드

| 자동모드 : 욕창위험 압력분산



공기방을 교대로 부풀려 둔부 압력 중심 위치 변경으로 욕창 방지

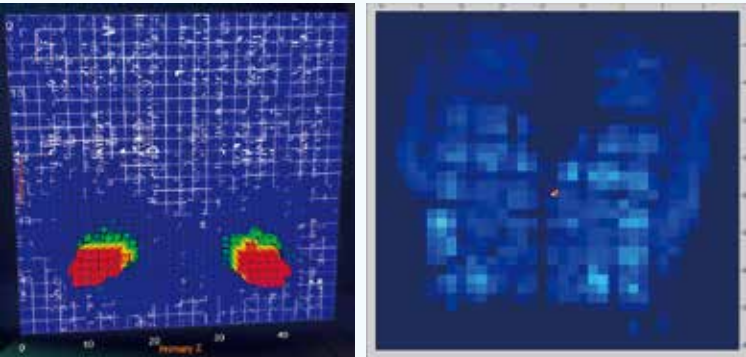

자동 순환 기능에 의한 둔부 압력 중심 이동

제품사양



무게 : 1.5 kg
 규격 : 가로 380 X 세로 385 X 높이 90 mm
 조작부 포함 : 가로 380 X 세로 450 X 높이 90 mm
 ※ 고령친화 우수제품 선정 (2023.08.01)
 ※ 욕창예방 기술 특허 출원 : 욕창방지 시스템 외 7건

욕창예방 전동방석 제품 기능 및 구조

공기 방식

- 체압을 분산하는 3분할 공기순환 방식
- TPU 공기방 내에 PU 폼을 삽입하여 둔부 2중 지지
- 좌측 좌골과 우측 좌골에 가해지는 압력 중심을 이동시키는 자동순환 기능
- 5분 이상 자세가 틀어지면 '자세조정'을 표시하여 자세 이상 경고

폼 지지대

- 둔부와 대퇴부를 안정적으로 지지하는 폴리우레탄 폼 지지대
- 공기방식 사용 시 나타나는 둔부의 불안정한 흔들림 방지
- 자세변형 시에도 꼬리뼈와 대퇴대전자뼈 부위가 닿지 않도록 설계
- 공기방식과 함께 체압을 분산하는 인체공학적 설계

외피

- 난연소재 외피
- 측면부 통기성 높은 3D 메쉬
- 외피 접힘을 방지하는 입체적인 봉제라인



기본 모드로
공기량 조절



자동 모드로
더욱 편안하게



자세조정 경고로
바른 자세 유지



인체공학적 설계로
편한 착석감



배김을 방지한
봉제 라인